



Care Virasoothe chladivý gel na zmírnění nepříjemných příznaků planých neštovic

Přečtěte si prosím pozorně celý návod k použití, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Ponechte si návod k použití pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu. Pokud potřebujete další informace nebo radu, obraťte se na svého lékárníka. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, vyhledejte lékaře.

1. Co je Care Virasoothe a k čemu se používá

Care Virasoothe obsahuje unikátní patentovanou technologii Osmo Care, u které bylo klinicky prokázáno, že zmírňuje příznaky podráždění při planých neštovicích tím, že ochlazuje pokožku a zmírňuje tak svědění. Ochranou okolí postižené pokožky napomáhá jejímu přirozenému hojení, což snižuje pravděpodobnost vytvoření jizev.

2. Složení

Glycerol, PEG-8, kaprylyl glykol, polyakrylát sodný, karbomer, hydroxid sodný a čišťená voda.

Neobsahuje konzervační látky.

3. Možné nežádoucí účinky

V případě výskytu alergie na kteroukoli složku produktu omyjte postiženou oblast mýdlem a vodou a kontaktujte lékaře. Někteří pacienti mohou při aplikaci produktu pociťovat mravenčení.

Nežádoucí příhody mají být hlášeny na telefonní číslo (+44) 1484 848164 nebo na e-mailovou adresu thorntonross@medinformation.co.uk, případně na telefonní číslo (+420) 257 888 111 nebo na e-mailovou adresu farmakovigilance@stada-pharma.cz nebo případně na SÚKL: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Oddělení klinického hodnocení ZP a vigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, ČR

4. Jak Care Virasoothe používat

Tento produkt je určen pro děti starší 6 měsíců.

Nepoužívejte jej, je-li pečetí tuby po zakoupení produktu otevřena nebo porušena.

Před a po použití gelu si ruce umyjte a osušte.

Menší množství gelu jemně vmasírujte do pokožky. Takto aplikujte dvakrát až třikrát denně nebo v případě potřeby častěji.

U dětí mladších 6 měsíců lze tento produkt používat pouze pod lékařským dohledem.

5. Kde používat Care Virasoothe?

Lze používat na celý obličej a tělo.

Určeno pouze k zevnímu použití.

6. Kdy vyhledat lékaře

Před použitím produktu Care Virasoothe u dětí mladších 6 měsíců, u dospělých osob trpících planými neštovicemi a u těhotných a kojících žen se nejprve poraďte s lékařem. Pokud Vaše dítě dostane horečku, pokud vyrážka zasáhne i oči nebo pokud pokožka kolem skvrn oteče, bolí nebo velmi zarudne, okamžitě vyhledejte lékaře. Svého lékaře rovněž vyhledejte, pokud si nejste jisti, zda se opravdu jedná o plané neštovice.

7. Uchovávání

Uchovávejte v originálním obalu. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Spotřebujte do 12 měsíců od otevření. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla. Použitý obal zlikvidujte v souladu s místními požadavky.

8. Upozornění

- Zabráňte kontaktu s očima.
- Pokud nedopatřením dojde k vniknutí produktu do očí, vypláchněte oči velkým množstvím čisté vody.
- Pokud podráždění přetrvává, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.
- Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
- U dospělých, starších osob a dětí mladších 6 měsíců smí být tento produkt používán pouze pod lékařským dohledem.
- V případě výskytu přecitlivělosti na kteroukoli složku produktu, omyjte postiženou oblast mýdlem a vodou a kontaktujte lékaře.
- Pokud nedopatřením dojde k požití gelu, vypláchněte ústa vodou a kontaktujte lékaře.

Thornton & Ross Ltd., Linthwaite,
Huddersfield, HD7 5QH, UK.

HALSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5
23562 Lübeck
Germany/Německo

25 °C



Zdravotnický
prostředek



Distributor v ČR:
Stada Pharma CZ, s.r.o., Siemensova 2717/4
155 00, Praha 5
Datum poslední revize: Únor 2025



ViraSoothe™

chladivý gel na zmírnění nepříjemných příznaků
planých neštovic



9380157 2504 CZ